

# Simeon | Supportive Hearing Systems Inc.

## Audita Charging Guide

### charging the receiver / speaker




ensure the power adapter is connected to the correct charging jack labeled "DC IN 20V"



use the proper (20V) power adapter

ensure all connection points are snug

when in doubt try another outlet

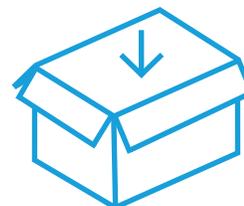


fully charge the receiver before storing for significant periods

### charging the transmitters / microphones



only use the recommended rechargeable batteries - alkaline batteries will destroy the transmitter and void its warranty

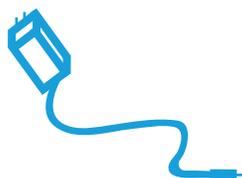

use the proper (5V) power adapter

ensure all connection points are snug

when in doubt try another outlet



flashing lights on the cradle or the transmitter indicate a refusal to charge

ensure the batteries are not already charged

ensure the correct batteries are inserted

# Simeon | Supportive Hearing Systems Inc.

## Audita – Guide de recharge

### Pour charger le récepteur / haut-parleur




Assurez-vous que l'adaptateur de courant soit branché dans la bonne prise de chargement contenant l'inscription « DC IN 20V »



Utiliser le bon adaptateur de courant (20V)

Assurez-vous que toutes les prises de connexions soient poussées à fond

En cas de doute, branchez dans une autre prise de courant

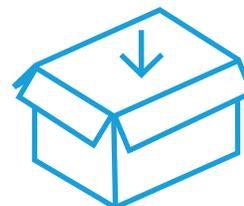


Chargez pleinement le récepteur avant de l'entreposer pour de longues périodes

### Pour charger l'émetteur / microphone



Utilisez que les piles rechargeables – l'utilisation de piles alcalines annulera la garantie et endommagera l'émetteur

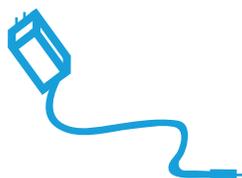

Utilisez le bon adaptateur de courant (5V)

Assurez-vous que toutes les prises de connexions soient poussées à fond

En cas de doute, branchez dans une autre prise de courant



Un voyant clignotant sur l'embase de chargement ou sur l'émetteur indique que le chargement ne s'effectue pas

Assurez-vous que les piles ne soient pas déjà complètement chargées

Utilisez seulement les piles recommandées